

**Produktinformation:**

***Moorkompresse***

**REF** 600085 + 600086

**Anwendungsbereiche:**

Moorkompressen sind Torfmoor gefüllte natürliche Wärmekompressen.

Moorkompressen sind nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt und können in folgenden Anwendungsgebieten eingesetzt werden:

- ◆ Hexenschuss
- ◆ Menstruationsschmerzen
- ◆ Muskelkater
- ◆ Rheumatische Schmerzen
- ◆ Rückenschmerzen
- ◆ Verspannungen

**Anwendungshinweise:**

**Wasserbaderwärmung:**

Zur Wärmeanwendung legen Sie die Kompresse ca. 4 Minuten in max. 80 °C heißes Wasser.

**Mikrowellenerwärmung:**

Zur Wärmeanwendung in der Mikrowelle bei 600 Watt max. 2 Minuten erhitzen. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. in 30 Sekunden Intervallen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Es empfiehlt sich das Produkt nach etwa 1 Minute zum Verteilen des erwärmten Inhaltes zu entnehmen, durchzukneten und danach erneut zu erhitzen. Schlagen Sie die Kompresse vor dem Auflegen auf die Haut in ein dünnes Tuch ein.

Vorsicht! Überhitzung kann die Moorkompresse zerstören. Beschädigte Kompressen dürfen nicht mehr verwendet werden! Moorkompressen dürfen nicht im Backofen oder im Grill erwärmt werden!

Wärme direkt nach einer Sportverletzung kann den Blutfluss zur Verletzung hindern und damit Entzündungen fördern.

**Die Aufwärmzeit ist von der Größe der Moorkompresse abhängig.**

Größe	Wasserbad max. 80 °C	Mikrowelle 600 Watt
Schulter	4 Minuten	2 Minuten
30 x 40	5 Minuten	3 Minuten

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der Gello GmbH Geltechnik und der zuständigen Behörde.

