



Thermometergehäuse



HINWEIS Vor der Reinigung eine neue Sondenhülle auf das Thermometer stecken.


Zugelassene Reinigungsmittel

- 70%iger Isopropylalkohol oder Ethylalkohol
- Wasserstoffperoxid (Virox, Oxivir)
- Quaternäre Ammoniumverbindungen (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes®, Sanicloth)
- 10%ige Hypochloritlösung




Trocken reiben. 5 Minuten warten, damit sie vollständig trocknen können. Sicherstellen, dass das Thermometergehäuse vor der Verwendung trocken ist.

Thermometerkontakte

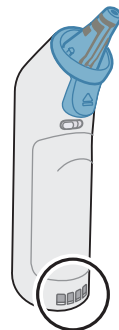

Zugelassene Reinigungsmittel

- 70%iger Isopropylalkohol oder Ethylalkohol

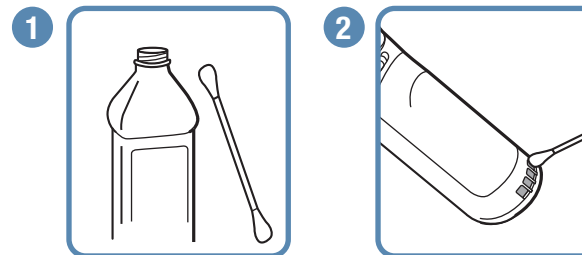

Das Thermometer 1 Minute lang liegen lassen, damit die Kontakte an der Luft trocknen können.

Linienfenster und Sonde



Zugelassene Reinigungsmittel

- Nur 70%iger Isopropylalkohol oder Ethylalkohol!



Trocken reiben. 5 Minuten warten, damit sie vollständig trocknen können. Sicherstellen, dass die Sondenspitzenlinse vor der Verwendung trocken ist.

80027272 Ver. B
Änderungsdatum: 12-2020
©2020 Welch Allyn, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.



7d
welchallyn.com

Dieses Produkt wird von Welch Allyn, Inc. nach einer Lizenz der Marke „Braun“ hergestellt. „Braun“ ist eine eingetragene Marke der Braun GmbH in Kronberg, Deutschland. ThermoScan ist eine eingetragene Marke von Helen of Troy Limited.

Hillrom Technischer Kundendienst

hillrom.com/en-us/about-us/locations/

Welch Allyn, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Hill-Rom Holdings, Inc.